

# STERRAD VELOCITY™

Cada minuto importa.



## ASP STERRAD VELOCITY®

Indicador Biológico/Pacote Teste Desafio

### COMO USAR O SISTEMA STERRAD VELOCITY 15 MINUTOS

Esta tabela é uma ferramenta de referência para o Sistema Indicador Biológico STERRAD VELOCITY™ 15 minutos. Consulte o Guia do Usuário e as Instruções de Uso para obter detalhes adicionais de processamento.

Para obter mais informações, entre em contato com o Suporte ao Cliente ASP no número 1-888-STERRAD ou visite [www.asp.com](http://www.asp.com).

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Av. Tamboré, 1077 - Parte A - Tamboré, Barueri, SP. CEP: 06460-000. Responsável técnico: Dra. Patrícia Ellen Nakano - CRF-SP 23230. (Leitora Sterrad Velocity™ 15 minutos e Indicador Biológico Velocity™ 15 minutos - ISENTO DE REGISTRO). Elaborado em: 09/2021 - BRMRASP 3950 - versão 1 - 2012. ©ASP 2021. All rights reserved. Os produtos comercializados e marcas registradas são propriedade da ASP Global Manufacturing, Gmb

## 1 SET UP

Antes de usar o Indicador Biológico (IB) STERRAD VELOCITY™, verifique a data de validade na caixa e no frasco e verifique a data de descarte.

NOTA: Se um adesivo for usado, não o coloque na tampa ou no fundo do frasco. Não coloque marcas no código de barras ou nas janelas de entrada de esterilizante.



## 2 CICLO DE ESTERILIZAÇÃO

- Se o Esterilizador STERRAD® estiver equipado com um leitor, escaneie o código de barras do IB na etiqueta da tampa.
- Coloque o IB STERRAD VELOCITY™ na área mais desafiadora para o esterilizante alcançar.
  - Sistemas STERRAD® NX e 100NX: coloque na prateleira inferior, próximo à parte traseira da câmara.
  - Sistemas STERRAD® 100S: coloque na prateleira inferior, próximo à parte frontal da câmara.

## 3 PÓS-ESTERILIZAÇÃO

- A ASP recomenda o uso de luvas ao manusear o IB STERRAD VELOCITY™ que foi exposto ao peróxido de hidrogênio.
- Imediatamente após o ciclo se completar, retire o IB do esterilizador.
- Inspeção o IB para verificar se o meio de crescimento está roxo, se a ampola permaneceu intacta durante o ciclo de esterilização e se o disco de esporos está na posição horizontal na parte inferior do reservatório de crescimento.



## 4 PREPARAÇÃO DO IB PARA INCUBAÇÃO

- Toque em um número de indicador de poço disponível na tela sensível ao toque da leitora.
- Toque em **Test** (Teste) quando perguntado qual tipo de IB será adicionado.
- Escaneie o código de barras na etiqueta da tampa, usando o leitor de código de barras na parte frontal da leitora.
- Inspeção o indicador químico na parte superior da tampa quanto à mudança de cor, de vermelho/rosa para amarelo, para confirmar que o IB foi exposto ao peróxido de hidrogênio.



## 5 ATIVAR E INCUBAR O IB

- Ative o IB antes de colocá-lo na leitora. Para ativar, pressione completamente a tampa (ou use o Ativador STERRAD VELOCITY™ opcional) até que a ampola de vidro quebre, inspecionando visualmente para verificar se a ampola de vidro quebrou. Agite rapidamente para assegurar que o líquido flua para o reservatório de crescimento. Não seguir esse procedimento pode resultar em leitura incorreta.
- Coloque o IB processado no poço selecionado da Leitora.

NOTA: O IB deve ser colocado na Leitora dentro de 2 horas após a conclusão do ciclo de esterilização.



## 6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- Após 15 minutos, a Leitora STERRAD VELOCITY™ exibirá e registrará os resultados.
- Um resultado negativo em um IB de teste significa que uma condição de esterilização foi alcançada. Os resultados do IB de teste são válidos somente com resultados de controle positivo.

NOTA: Não remova o indicador biológico da leitora até que o display da leitora indique que o teste foi concluído.



## 7 RESULTADOS DE IB DE TESTE POSITIVO

- Um resultado positivo em um IB de teste significa que uma condição de esterilização não foi alcançada. Se um resultado positivo for observado:
  1. Siga os procedimentos da sua instalação sobre quarentena ou recuperação e processamento de instrumentos potencialmente não estéreis e notificação para os médicos.
  2. Repita o teste com o segundo IB. Se o segundo IB for negativo, execute um terceiro IB para confirmar o desempenho do esterilizador. Se o segundo ou o terceiro IB for positivo:
    - a. Por fim, reporte o IB positivo à ASP, incluindo o número de lote do produto.
    - b. Leve o esterilizador para ser verificado pela ASP e não use o esterilizador até que tenha sido verificado.

## 8 DESCARTE

- Descarte os frascos do IB STERRAD VELOCITY™ imediatamente após a leitura final, de acordo com os procedimentos da sua instalação.
- Qualquer IB positivo, incluindo um IB de controle positivo ou qualquer indicador biológico de um ciclo cancelado deve ser submetido à autoclave por pelo menos 30 minutos a 121 °C (250 °F) ou de acordo com as políticas e procedimentos do seu hospital ou instalação de saúde.



Protecting patients during their most critical moments™

ASP Advanced Sterilization Products

33 Technology Drive, Irvine, CA 92618  
© ASP 2020. All rights reserved.  
073749-191220